

## Sicherheitshinweise

### Anwendungsbedingungen

Der Wannengriff beabsichtigt die Unterstützung der natürlichen Bewegung und nicht die komplette Last des Körpergewichtes des Anwendenden zu tragen.

Da es innerhalb der folgenden Sicherheitshinweise nicht zu einer vollkommenen Berücksichtigung aller eventuell auftretenden Umstände kommen kann, ist im Einzelfall der Nutzer selbst angewiesen zu prüfen, ob die beabsichtigte Anwendung des Wannengriffs den bereitgestellten Anwendungsbedingungen entspricht.


### Reinigungshinweise

Der Untergrund muss staub-, fett-, kalkfrei und trocken sein. Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit beiliegendem Schleifvlies und geeignetem Reiniger. Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche. Lassen Sie die gereinigte Stelle entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit ablüften.

### Montagehinweise

#### **Achtung – Sturzgefahr.**

Durch einen ungeeigneten Untergrund kann die Halteleistung der Befestigungsadapter beeinträchtigt werden und somit zu einer unvorhersehbaren Lösung dieser kommen.

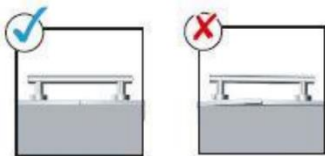

- Der Untergrund muss eben sein, damit die komplette Haltekraft gewährleistet ist.
- Nicht im Duschbereich montieren
- Das Produkt darf nicht regelmäßig nass werden (kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand), da sonst Ablösung droht (Sturzgefahr!).
- Nur geeignet für ebene, trockene und glasierte Fliesen mit nur gelegentlichem Spritzwasser.
- Die Befestigungsadapter sollten nicht auf Fugen platziert werden.

Folgen von Alterung, inkorrektener Anbringung, oder bei Trockenbauweise können dazu führen, dass die Halteleistung von Untergrundmaterialien wie Fliesen nicht ausreichend gegeben ist. So kann es auch bei Belastung eines korrekt montierten Wannengriffs zu einer Ablösung des Haftgrundes kommen.

- Bevor der Wannengriff zum ersten Mal benutzt wird, muss in jedem Fall die Stabilität des Haftgrundes geprüft werden.

## Produkthinweise

### **Achtung – Sturzgefahr.**

Eine ruckartige, eine mehr als vorgegebene oder eine nicht vorgesehene Belastung kann zu einem plötzlichen Versagen der Haltekraft führen.

- Vor Benutzung des Wannengriffs muss zunächst für den jeweiligen Benutzer die Eignung sowie dessen Nutzungsabsichten geprüft sowie ein sicherer Halt sichergestellt werden.
- Wannengriff darf mit maximal 130 kg belastet werden.
- Er ist nicht zur Nutzung als Ausstiegshilfe geeignet.
- Beschädigungen, eine sichere Montage und die Festigkeit der Verklebung des Produktes müssen regelmäßig geprüft werden. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung beträgt die Produktlebensdauer 5 Jahre.
- Der Wannengriff darf nicht abweichend vom vorgeschriebenen Gebrauch verwendet werden (z.B. als Sportgerät).

Bei einem Defekt darf das Produkt nicht verwendet werden.



### Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

## Wiederverwertung

Das Produkt kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen **tesa® Power.Kit** Befestigungsadapter (BK164-2) wiederverwendet werden. Bevor der Wannengriff wieder benutzt wird, müssen die oben aufgeführten Sicherheitshinweise erneut beachtet und durchgeführt werden.