

Sicherheitshinweise

Anwendungsbedingungen

Der Wannengriff beabsichtigt die Unterstützung der natürlichen Bewegung und nicht die komplette Last des Körpergewichtes des Anwendenden zu tragen.

Da es innerhalb der folgenden Sicherheitshinweise nicht zu einer vollkommenen Berücksichtigung aller eventuell auftretenden Umstände kommen kann, ist im Einzelfall der Nutzer selbst angewiesen zu prüfen, ob die beabsichtigte Anwendung des Wannengriffs den bereitgestellten Anwendungsbedingungen entspricht.


Reinigungshinweise

Der Untergrund muss staub-, fett-, kalkfrei und trocken sein. Nach erfolgter Grundreinigung mit Reinigungsalkohol nachreinigen. Silikonhaltige Reiniger sind zur Reinigung nicht geeignet.

Montagehinweise

Achtung – Sturzgefahr.

Durch einen ungeeigneten Untergrund kann die Halteleistung der Befestigungsadapter beeinträchtigt werden und somit zu einer unvorhersehbaren Lösung dieser kommen.

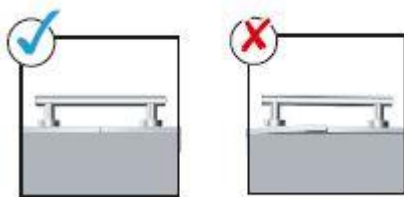

- Der Untergrund muss eben sein, damit die komplette Haltekraft gewährleistet ist.
- Nicht im Duschbereich montieren
- Produkt darf nicht regelmäßig nass werden (kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Geeignet für trockene Flächen mit nur gelegentlichem Spritzwasser.
- Die Befestigungsadapter sollten nicht auf Fugen platziert werden.

Folgen von Alterung, inkorrektener Anbringung, oder bei Trockenbauweise können dazu führen, dass die Halteleistung von Untergrundmaterialien wie Fliesen nicht ausreichend gegeben ist. So kann es auch bei Belastung eines korrekt montierten Wannengriffs zu einer Ablösung des Haftgrunds kommen.

- Bevor der Wannengriff zum ersten Mal benutzt wird, muss in jedem Fall die Stabilität des Haftgrundes geprüft werden.

Produkthinweise

Achtung – Sturzgefahr.

Eine ruckartige, eine mehr als vorgegebene oder eine nicht vorgesehene Belastung kann zu einem plötzlichen Versagen der Haltekraft führen.

- Vor Benutzung des Wannengriffs muss zunächst für den jeweiligen Benutzer die Eignung sowie dessen Nutzungsabsichten geprüft sowie ein sicherer Halt sichergestellt werden.
- Wannengriff darf mit maximal 130 kg belastet werden.
- Er ist nicht zur Nutzung als Ausstiegshilfe geeignet.
- Beschädigungen und eine sichere Montage müssen regelmäßig geprüft werden.
- Der Wannengriff darf nicht abweichend vom vorgeschriebenen Gebrauch verwendet werden (z.B. als Sportgerät).

Bei einem Defekt darf das Produkt nicht verwendet werden.

Wiederverwertung

Das Produkt kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen **tesa® Power.Kit** Befestigungsadapter (BK164-2) wiederverwendet werden. Bevor der Wannengriff wieder benutzt wird, müssen die oben aufgeführten Sicherheitshinweise erneut beachtet und durchgeführt werden.